

プラス
洗浄力 + だから
洗浄工程が省けます。

洗浄

除菌

消臭

医療施設用 衛生管理製品

HBクワット-MC

AOAC法検査合格 EPA登録商品（登録No.61178-1）



原液2ℓ

HB クワット-MC

簡単で早い

プラス
洗浄力 + だから 除菌時に必要な
洗浄工程が省けます。

除菌時の洗浄工程



HB クワット-MC これだけで OK



確かな効果

犬パルボウイルス他、約 140 種類の
真菌・ウイルス・細菌に対し効果を発揮する、
EPA の登録製品です。

消臭効果

臭いの元となる細菌に直接アタックして
効果を発揮します。

ステンレス製品にも安心

ケージや ICU に最適です。

低コスト

洗浄剤が不要です。
60 倍希釈で経済的です。




信頼と安心

米国環境保護庁 (EPA) 登録製品 (登録No.61178-1)

“世界で最も厳しい検査基準” といわれている EPA 指定の AOAC 検査方法で
「効果・安全性・環境負荷」等についての試験に合格し、
米国に於いて「殺菌効果」と「環境衛生用としての使用目的」が認められた
製品です。

HB クワット-MC のパルボウイルスに対する不活化効果

(0 分のウイルス感染値を 100 とした場合の感染値減少率/60 倍希釈での試験)

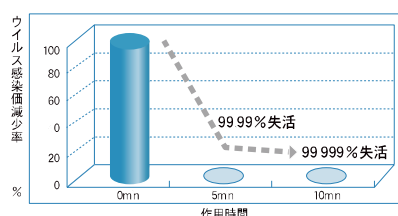

※試験機関
Gibraltar Laboratories, Inc.
試験報告書
REPORT No.G-88964.6

院内どこでも使えます

- ・ケージ・ICU・手術台・処置台・診察台・シンク・ドッグバス・トリミング台
- ・手術器具・床・食器・リネン・受付台・机・椅子・ドアノブ・排泄物・その他



使用方法 (60 倍希釈)

手術台など



体液や血液等に十分にスプレーし (目安 8 ~ 10cc / 0.5 m²)、
よく浸透させた後 ペーパータオルなどで拭き、再度スプレーし
拭き取ります。

手術器具など



トレイ等に 5 ~ 10 分程度浸漬させ、
(必要の場合はブラッシング) 流水ですすぎます。
次にオートクレーブ等で滅菌作業を行います。

<製品仕様>

成分 / DDAC (ジデシル・ジメチル・アンモニウム・クロライド)
塩化ベンザルコニウム、非イオン界面活性剤
性成 / 液体: 弱アルカリ性 (60 倍希釈時)
外観: 黄色液体
比重: 1.04
ph: 11.5 (原液)
香り: 柑橘系
使用濃度 / 20 ~ 60 倍希釈

総代理店



株式
会社

ヒューベス

〒350-1317 埼玉県狭山市水野 432-4

tel: 04-2935-7644 ・ fax: 04-2935-7645

URL: <https://www.huves.co.jp>

販売元

株式会社 **ソイレン**

製造元

Airkem Professional products USA

HCHB1903-6